



fas
Aligner System



FOTOGRAFIE EXTRAORALI

ED

ERRORI PIÙ FREQUENTI

MOTIVI DEL RIFIUTO

Occhiali o accessori (berretti, cappelli, occhiali, ecc.)

- Non guarda la telecamera/occhi chiusi
- Il viso del paziente è inclinato
- Il paziente non è dritto
- Non puoi vedere i lobi delle orecchie
- Non è in occlusione
- Non ha divaricatori
- Foto sfuocate o pixelate
- Non c'è vista frontale
- È intraorale, non extraorale
- È extraorale, non intraorale
- Pessima visione del piano
- Foto sulla poltrona del dentista

TIPS


- Mascella inferiore parallela al pavimento
- Le foto devono essere scattate su uno sgabello o in piedi, non sulla poltrona del dentista
- Il paziente deve stare in posizione eretta con le spalle dritte e guardare dritto davanti a sé
- La nostra visione deve essere alla stessa altezza di quella del paziente
- Dobbiamo vedere i lobi delle orecchie del paziente



**“RICORDA L'IMPORTANZA DI
PRENDERE DOCUMENTAZIONE
(fotografie e stl o impronte) PER LA
PRECISIONE DELL'ASSE DI
INSERIMENTO DELLA FERULA”**




SIMMETRIA FACCIALE

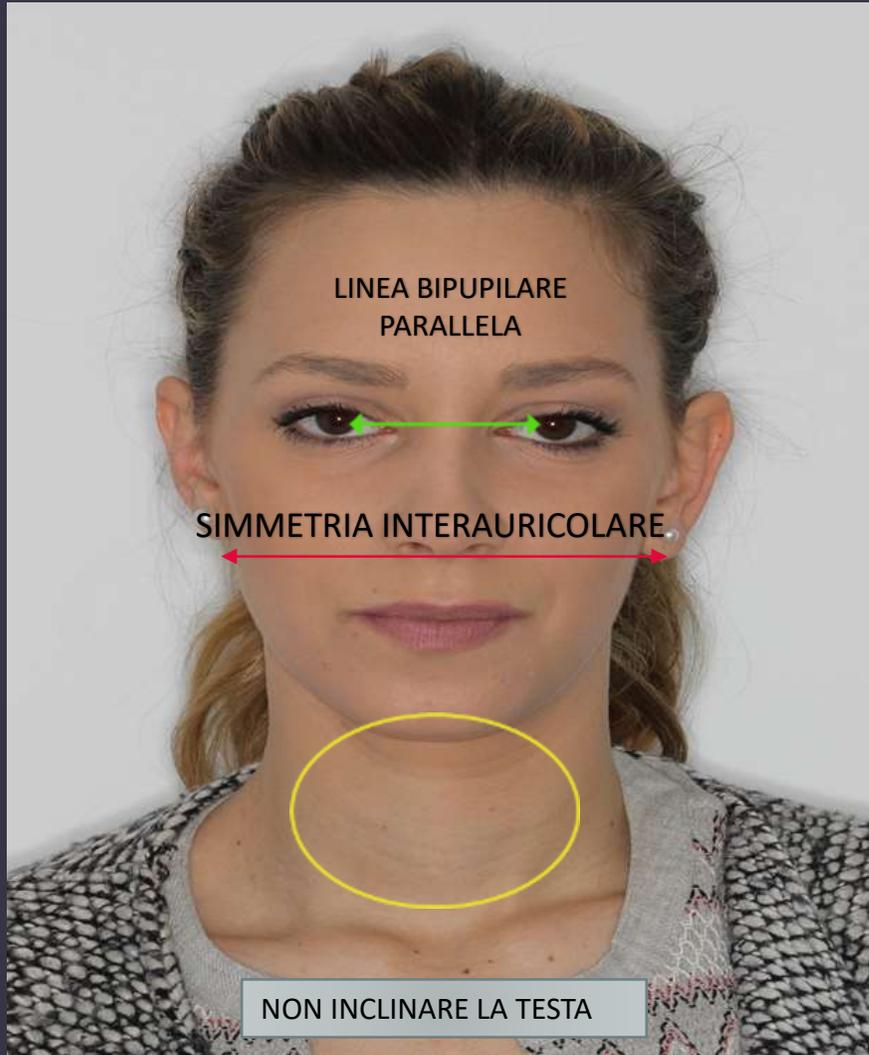

CAPELLI DIETRO LE ORECCHIE



FUOCO CENTRATO

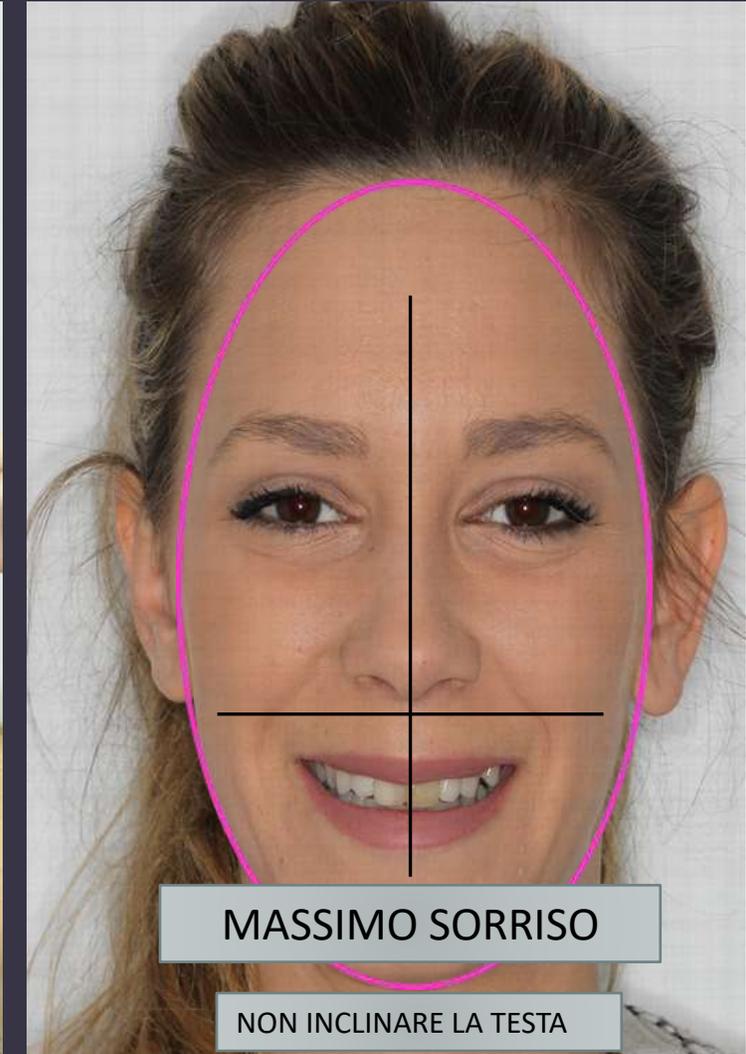




FRONTALE AMPIO
SORRISO



DIVARICATORI
SORRISO FRONTALI
IN OCCLUSIONE




FRONTALE
RIPOSO

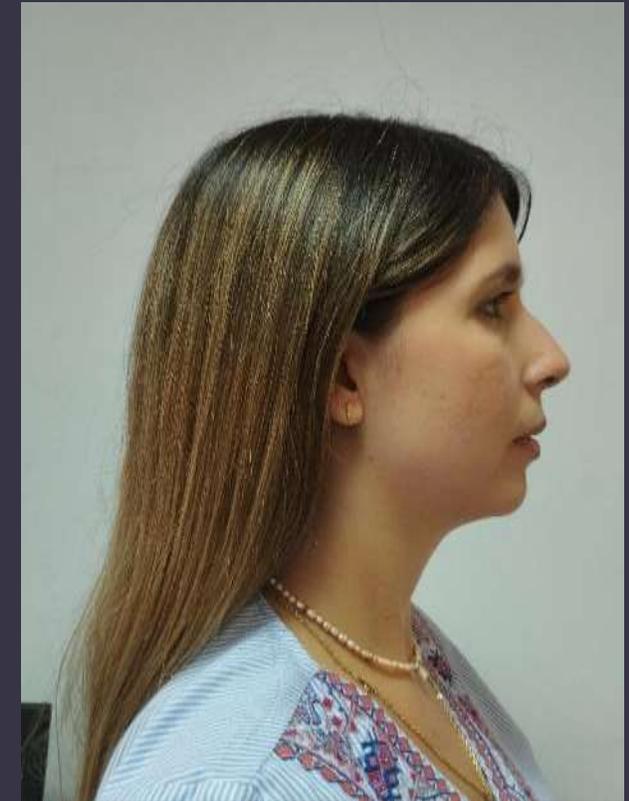

PROFILO


FOTOGRAFIE EXTRAORALI

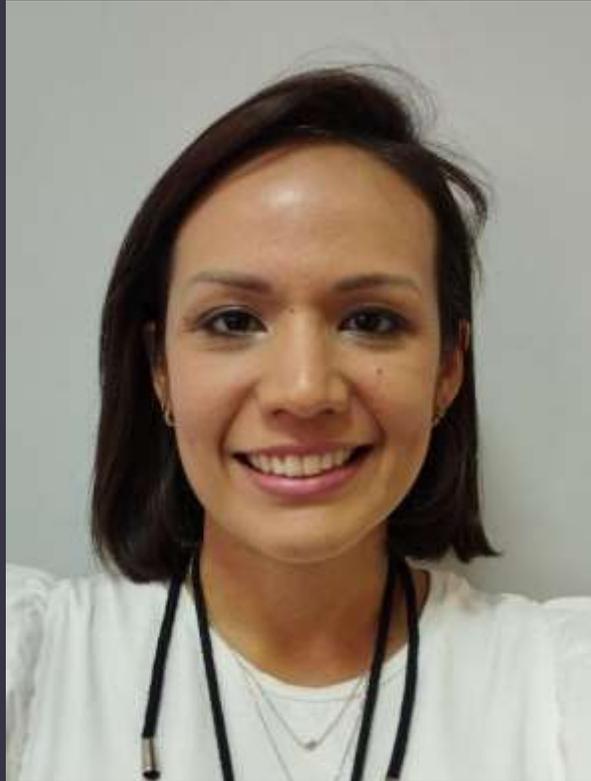


FRONTALE
AMPIO SORRISO



DIVARICATORI
SORRISO FRONTALE
IN OCCLUSIONE

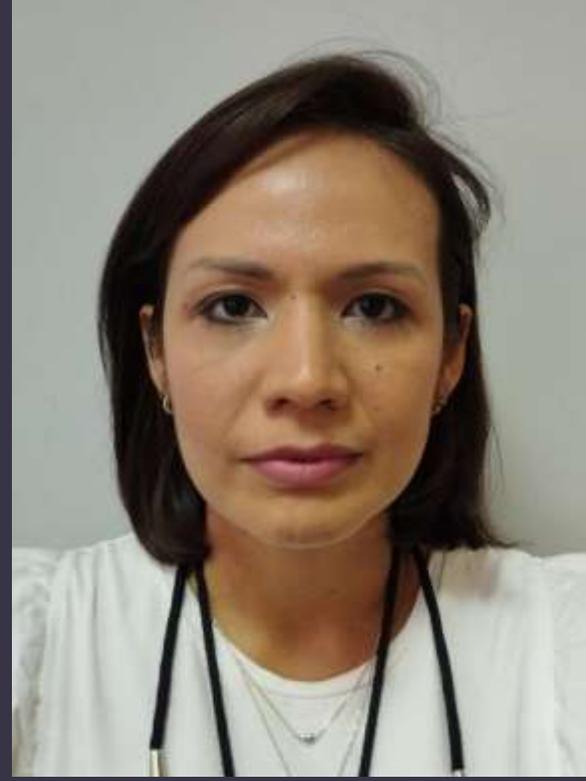

FRONTALE
RIPOSO

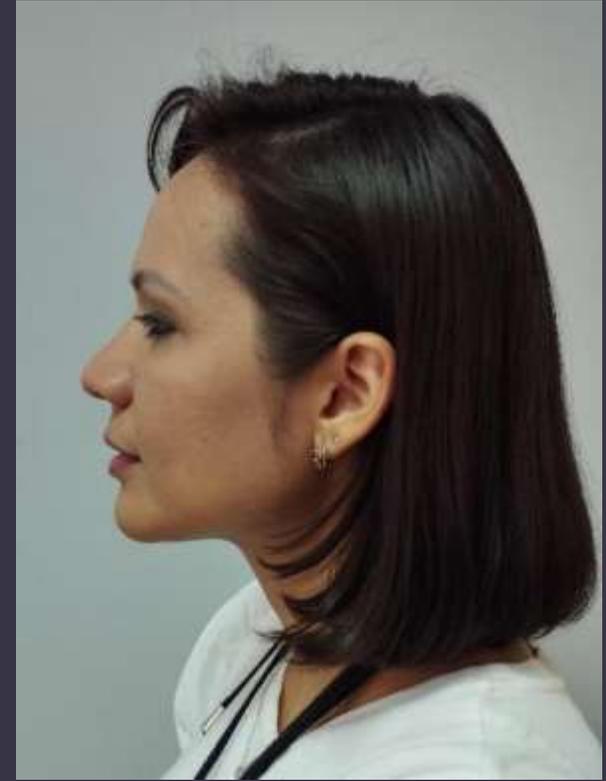

PROFILO

FOTOGRAFIE EXTRAORALI




FRONTALE
AMPIO SORRISO



DIVARICATORI
SORRISO FRONTALE
IN OCCLUSIONE



FRONTALE
RIPOSO

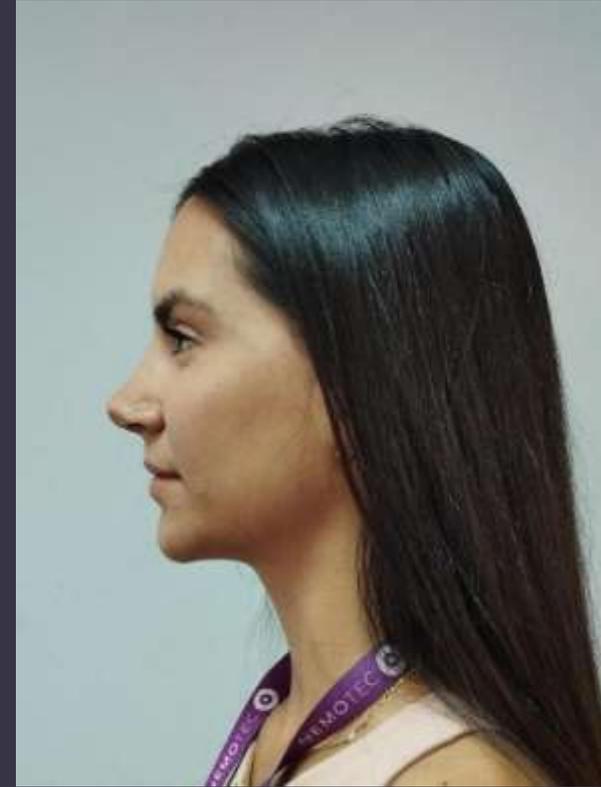

PROFILO



Scopri i lobi delle orecchie



Paziente con gli occhiali



Non guarda avanti, ha il viso inclinato, non si vedono i lobi delle orecchie




Non guarda davanti




Paziente con occhiali, testa ruotata



Paziente con gli occhiali

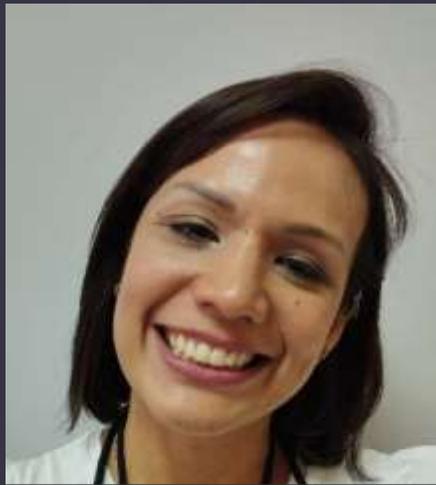


Faccia laterale, non vediamo i lobi delle orecchie

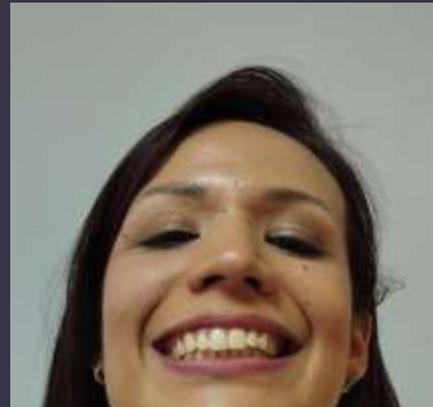

Non guarda in avanti, la mascella inferiore non è parallela al pavimento, non si vedono i lobi delle orecchie



Il nostro sguardo deve essere alla stessa altezza del paziente, non si vedono i lobi delle orecchie

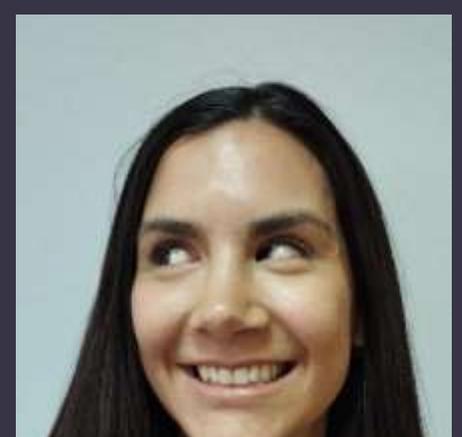

Non guarda avanti, ha il viso inclinato, non si vedono i lobi delle orecchie



Nessun lobo visibile, non guarda avanti



Non guarda avanti, piano inclinato



Piano inclinato, non guarda avanti



Viso inclinato



Piano inclinato in avanti, nessun lobo delle orecchie visibile



Il viso è inclinato, non guarda avanti, non è dritto



Non dritto, nessuna occlusione, non rivolto in avanti, nessun lobo delle orecchie visibile



Piano inclinato, paziente non in posizione eretta



Piano inclinato, vista a un lato