

fasKIDS

Il sistema individualizzato di mascherine trasparenti
per la crescita controllata dei pazienti più piccoli



Distributore Esclusivo per l'Italia





Il trattamento con gli mascherine trasparenti **FAS KIDS** è stato studiato specificatamente per bambini tra i 5 e i 12 anni di età.

FAS KIDS consente di intervenire già nella dentizione primaria, mista e permanente appena formata, prima che la malocclusione inizi a svilupparsi.


FAS KIDS SPIEGATO BREVEMENTE

L'obiettivo di **FAS KIDS** è quello di mantenere e ripristinare l'equilibrio funzionale nella bocca dei piccoli pazienti fin dalla tenera età.

Molti problemi ortodontici possono essere evitati intervenendo tempestivamente prima dello sviluppo della malocclusione.



FAS KIDS VANTAGGI

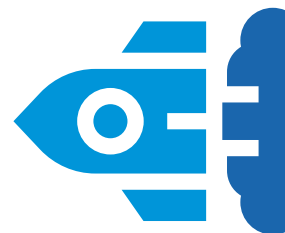

Il sistema FAS KIDS offre tantissimi vantaggi
per il clinico e per i pazienti più piccoli:



Alto livello di accettazione e compliance per merito del maggiore comfort rispetto ai tradizionali apparecchi rimovibili.



Minore rischio di carie tramite la regolare sostituzione degli mascherine trasparenti e all'igiene orale più semplice da gestire.



Minore rischio di lesioni nella cavità orale, nonché di fratture dentali, ottenuto per merito dei ridotti punti di pressione.



Mascherine trasparenti saranno indossate più a lungo, perché FAS KIDS è praticamente invisibile e può quindi essere usato durante la scuola, mentre si fa sport o nel tempo libero.



Nessuna alterazione fonetica.

FAS KIDS

INDICAZIONI

FAS KIDS è una terapia con mascherine trasparenti per il trattamento di pazienti con dentizione primaria, mista e permanente appena formata ed è stato studiato per i seguenti casi:



**Espansione
dento-alveolare**



Controllo verticale



**Correzione
dell'overbite**



**Correzione
del morso aperto**



**Controllo delle
abitudini viziate**



**Avanzamento
mandibolare**



**Prevenzione delle
malocclusioni
nella dentizione
permanente**



**Guida eruttiva
per i denti primari**

FAS KIDS-FLEX (409K2000)

Mascherine trasparenti singole per problemi semplici, **fino a 10 per arcata**.



Possibilità di richiedere **DIGITAL TRACKS*** con un costo aggiuntivo.



Movimenti semplici per 1 - 2 denti, un molare o un incisivo, in particolare nel morso incrociato.




Indicato per contenzione attiva.



Consente l'uso di **SMART HOOKS***.



Può essere utilizzato in combinazione con **SMART HOOKS*** per la contenzione attiva su denti di classe II e III.

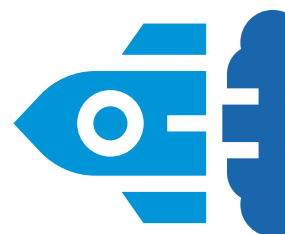

*Per ulteriori informazioni, consultare la pagina 10.

FAS KIDS-TARGET (409K2001)

K-TARGET è limitato a 20 mascherine trasparenti per arcata, include uno **STOP and GO*** e una seconda fase con un massimo aggiuntivo di 5 mascherine per arcata. Il trattamento è limitato a 18 mesi dopo l'approvazione del piano terapeutico proposto.



Consente **DIGITAL TRACKS*** all'inizio del trattamento (incorporati nella mascherina 0, per il posizionamento degli attachments).



Consente un avanzamento funzionale di non più di 2 mm.



Può essere combinato con **SMART HOOKS***.



Non consente la distalizzazione dei molari.



Risolve un affollamento fino a 4 mm.

*Per ulteriori informazioni su questo punto, consultare la pagina 10.



Diastema nella regione anteriore fino a 2 mm.



Livellamento dei bordi incisali e gengivali di un valore fino a 1 mm.



Espansioni fino a 2 mm per quadrante.



Rotazioni fino a 20°.



Overbite fino a 2 mm.




Morsi aperti fino a 1 mm.



Correzioni linea mediana fino a 1 mm.



Trattamento dei morsi incrociati di un dente posteriore o di due denti anteriori.

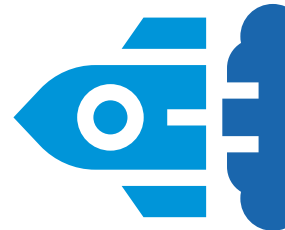

FAS KIDS-PRO (409K2002)

K-PRO è stato sviluppato per controllare la crescita del paziente. Con **K-PRO**, il trattamento è suddiviso in piccole fasi. Questo consente di adattare la terapia allo sviluppo del paziente, senza perdere il controllo sul trattamento.

K-PRO è costituito da 4 fasi con fino a 20 mascherine per fase e uno **STOP and GO®**. Il trattamento è limitato a 24 mesi dopo l'approvazione del piano terapeutico proposto.



Consente la distalizzazione dei molari fino a 2 mm.



Consente **DIGITAL TRACKS*** all'inizio del trattamento o dopo ogni **STOP and GO®** (incorporati nelle mascherine 0 per il posizionamento degli attachment).



Consente l'avanzamento mandibolare fino a 3 mm utilizzando elastici (gli avanzamenti oltre i 3 mm devono essere suddivisi in più fasi).



Consente l'uso di **OCCLUSAL BLOCKS*** (a pagamento). Ogni set di mascherine con **OCCLUSAL BLOCKS*** viene inviato due volte. Il requisito per l'uso di **OCCLUSAL BLOCKS*** è la presenza di molari da latte o molari già completamente erotti.



Uso di **SMART HOOKS***.

*Per ulteriori informazioni su questo punto, consultare la pagina 10.



Affollamento fino a 6 mm.



Diastemi fino a 4 mm.



Livellamento dei bordi incisali e gengivali fino a 2 mm.



Espansione fino a 3 mm per quadrante.



Rotazioni fino a 30°.



Overbite fino a 2 mm.



Morsi aperti fino a 2 mm.



Correzioni della linea mediana fino a 2 mm.



AUSILIARI OPZIONALI SMART HOOKS

Gli **SMART HOOKS** sono gli elementi di fissaggio disposti sulle mascherine trasparenti per utilizzare gli **elastici**.



Per i pazienti è più confortevole indossare gli mascherine trasparenti e più semplice gestire l'igiene orale.



Gli elastici sono facili da togliere e possono essere utilizzati con maggiore semplicità con le mascherine trasparenti.



Migliore gestione ed efficacia delle biomeccaniche durante la terapia.



Trasmissione delle forze sui denti attraverso le mascherine trasparenti.



AUSILIARI OPZIONALI

DIGITAL TRACKS (409K2004)

I **DIGITAL TRACKS** sono degli stop progettati digitalmente sulla base di un morso di costruzione con l'obiettivo di cambiare l'orientamento della posizione del morso.

L'obiettivo del trattamento è quello di ottenere piani inclinati sia nell'arcata

superiore, sia in quella inferiore.

Questo consente di ottenere uno scioglimento della mandibola sul piano sagittale e quindi, un'occlusione di prima classe.

Sono disponibili tre tipi di **DIGITAL TRACKS**:

1. Classe II 2. Classe III 3. Controllo dell'overbite

I **DIGITAL TRACKS** possono essere ordinati anche come prodotto separato (già inclusi nei pacchetti K-TARGET e K-PRO).



Per la realizzazione, servono i modelli con morso di costruzione con i molari e i canini posizionati correttamente. Con i **DIGITAL TRACKS** è possibile ottenere un avanzamento fino a 2 mm.



AUSILIARI OPZIONALI

LINGUAL STOPS

Accessori linguali utilizzati per controllare le abitudini viziate causate dal malposizionamento della lingua.

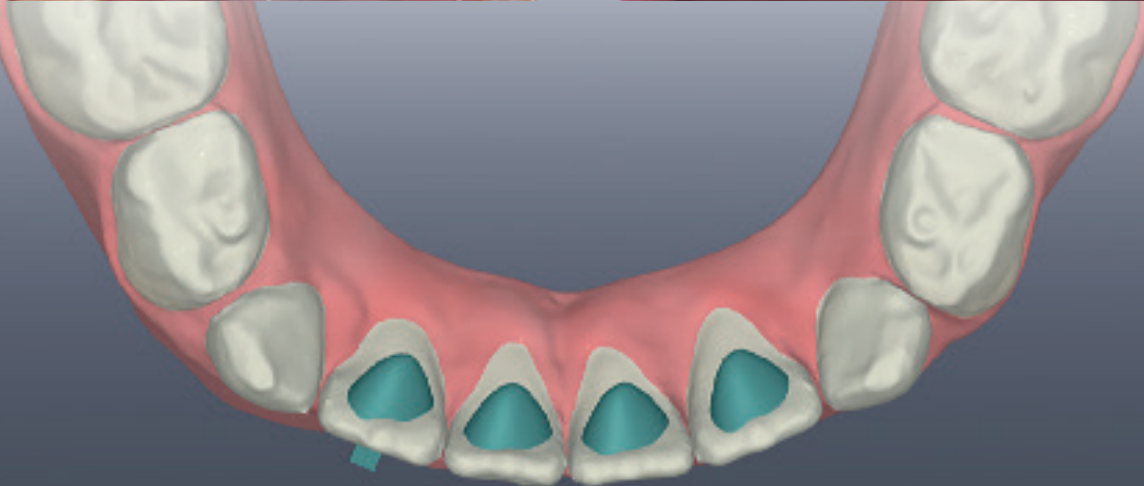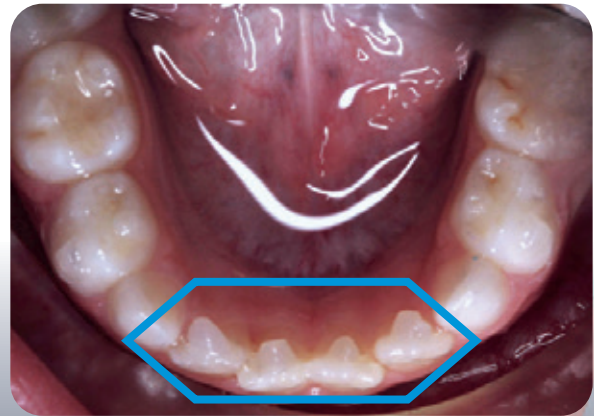

AUSILIARI OPZIONALI PER L'ERUZIONE DEI DENTI

MASCHERINE ATTIVE

Guida l'eruzione di un dente in un alloggiamento previsto nelle mascherine trasparenti, secondo la posizione programmata.

MASCHERINE PASSIVE

Mantiene uno spazio fino all'eruzione completa del dente.



AUSILIARI OPZIONALI

OCCLUSAL BLOCKS (409K2003)

Gli **OCCLUSAL BLOCKS** sono utilizzati per far avanzare la mandibola. Sono integrati negli mascherine trasparenti seguendo i principi dell'ortodonzia funzionale e sfruttando le forze occlusali per risolvere la malocclusione.

Gli **OCCLUSAL BLOCKS** sono componenti di un'apparecchiatura bimascellare costituito

da un blocco superiore e uno mandibolare, fornendo i piani per la correzione del morso ad un angolo di 70°. Questo determina uno spostamento in avanti della mandibola in un'occlusione di prima classe.

L'apparecchiatura così composta, assicura la corretta funzione e una normale pronuncia.



Gli **OCCLUSAL BLOCKS** garantiscono un comfort più alto e una visibilità ridotta rispetto a tutti gli altri apparecchi ortodontici funzionali. Questa apparecchiatura è la soluzione ideale per il trattamento delle classe II Div. I e classe II Div. II.

Gli **OCCLUSAL BLOCKS** possono essere ordinati solo con FAS KIDS PRO e sono composti da due set di mascherine trasparenti per ogni step del trattamento.



Info Nr. 237/05.2024

FORESTADENT

Bernhard Förster GmbH
Westl. Karl-Friedrich-Str. 151
75172 Pforzheim (Germany)

Phone: +49 (0) 7231 459-0
Fax: +49 (0) 7231 459-102
Email: info@forestadent.com
www.fasaligners.com

Distributore Esclusivo per l'Italia



www.orthopiu.it

