




Delta Dent iPad

Le funzioni di Delta Dent, a portata di Tablet!

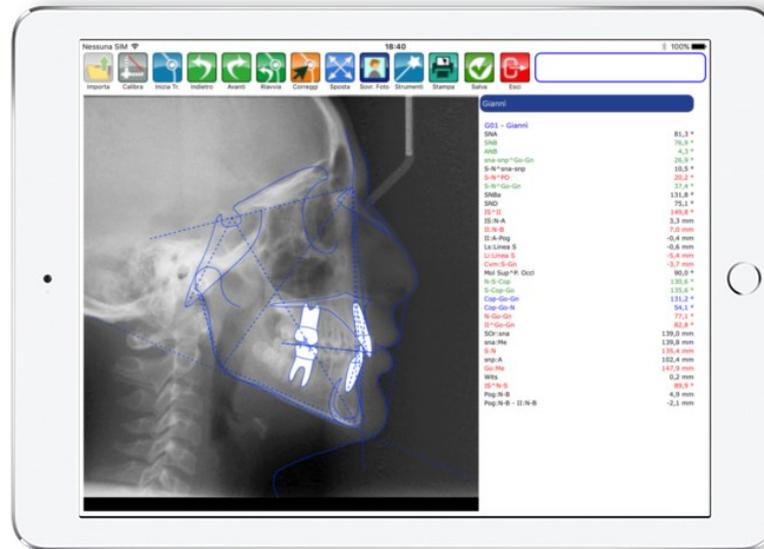



Sommario

- [ACCESSO ALL'APP](#)
- [ANAGRAFICA PAZIENTE](#)
 - [Nuovo Paziente](#)
 - [Modifica Paziente](#)
 - [Elimina Paziente](#)
- [IMPORTAZIONE IMMAGINI](#)
 - [Nuova Serie](#)
 - [Modifica Serie](#)
 - [Elimina Serie](#)
- [TRACCIATO SU RX LATERALE](#)
 - [Realizzazione](#)
 - [Correzione](#)
 - [Tools](#)
 - [Sovrapposizione Foto](#)



Accesso all'App

Nessuna SIM 16:00 100%

Delta-Dent iPad

Selezionare l'utente

Utente Cefalometria

Password Accedi

Contattaci

outside format

Registrato a OUTSIDE FORMAT Delta-Dent Versione 1.0 IT

Per accedere all'applicazione, selezionare l'utente e premere Accedi.

Nella versione DEMO, la password non è impostata.

Premendo "Contattaci", è possibile inoltrare una richiesta di assistenza tramite e-mail.





Anagrafica Paziente

Nessuna SIM 16:00 100%

 Delta-Dent iPad 

Elenco Pazienti Cerca 

 Nuovo  Esci


 **Rossi Mario**  **Urbano Francesco**





Anagrafica Paziente

Nuovo Paziente

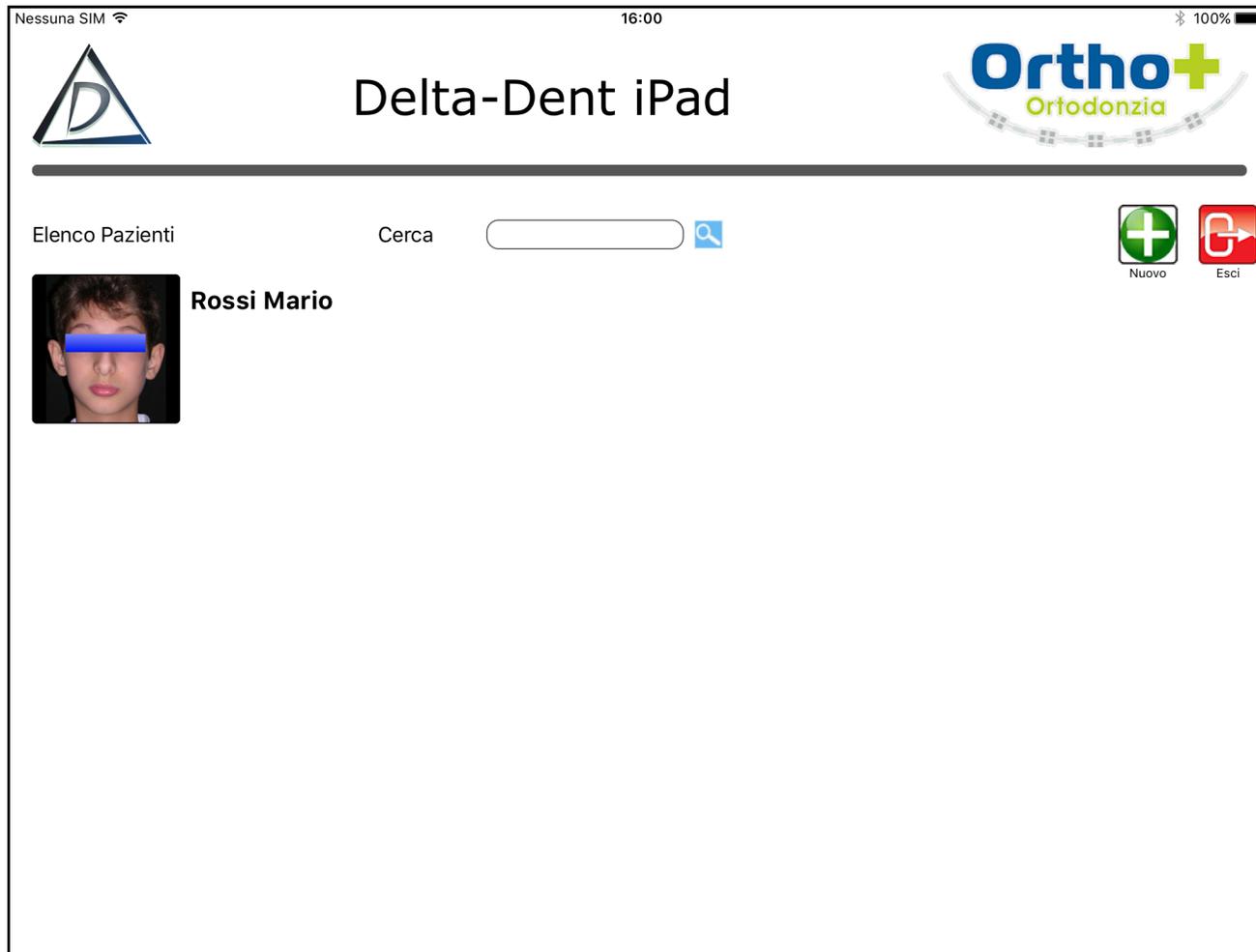

Premere il tasto "Nuovo"  per aggiungere un paziente.





Anagrafica Paziente

Nuovo Paziente

Nessuna SIM 16:00 100%

Scheda Paziente



Carica Elimina Salva Inizia Tr. Importa Esci

Cognome Nome

Nato il A Sesso M F Inserito il

Indirizzo Cod. Fiscale

CAP Città Prov.

Telefono Cellulare Email

Note

Serie Immagini

Inserire i dati e premere “Salva”  per memorizzare la scheda. I dati fondamentali per la realizzazione di una cefalometria sono: Nome, Cognome, Data di Nascita, e Sesso.

Per tornare all’elenco pazienti, utilizzare 





Anagrafica Paziente

Nuovo Paziente

The screenshot shows the iPad app interface for Delta-Dent. At the top, the status bar displays 'Nessuna SIM', '16:00', and '100%' battery. The app header includes the Delta-Dent logo on the left, the text 'Delta-Dent iPad' in the center, and the Ortho+ Ortodonzia logo on the right. Below the header, there is a section titled 'Elenco Pazienti' with a search bar labeled 'Cerca' and a magnifying glass icon. Two patient entries are visible: 'Rossi Mario' with a photo of a young boy, and 'Urbano Francesco' with a photo of a man. The 'Urbano Francesco' entry is highlighted with a red rounded rectangle. To the right of the search bar are two icons: a green plus sign labeled 'Nuovo' and a red 'G' icon labeled 'Esci'.





Anagrafica Paziente

Modifica Paziente

The screenshot shows the iPad application interface. At the top, the status bar displays 'Nessuna SIM', '16:00', and '100%' battery. The app header includes the Delta-Dent logo on the left, the text 'Delta-Dent iPad' in the center, and the Ortho+ Ortodonzia logo on the right. Below the header, there is a search bar labeled 'Cerca' with a magnifying glass icon. To the right of the search bar are two icons: a green plus sign labeled 'Nuovo' and a red minus sign labeled 'Esci'. The main content area is titled 'Elenco Pazienti' and displays two patient cards. The first card shows a photo of a young boy and the name 'Rossi Mario'. The second card shows a photo of a man and the name 'Urbano Francesco', and this card is highlighted with a blue rounded rectangular border.

Selezionare la scheda paziente da modificare o eliminare.





Anagrafica Paziente

Modifica Paziente

Nessuna SIM 16:00 100%

Scheda Paziente



Carica Elimina Salva Inizia Tr. Importa Esci

Cognome Nome

Nato il A Sesso M F Inserito il

Indirizzo Cod. Fiscale

CAP Città Prov.

Telefono Cellulare Email

Note

Serie Immagini

Modificare i dati e premere "Salva"  per memorizzare la scheda.

Per tornare all'elenco pazienti, utilizzare 





Anagrafica Paziente

Elimina Paziente

Nessuna SIM 16:00 100%

Scheda Paziente



Cognome Nome

Nato il A Sesso M F Inserito il

Indirizzo Cod. Fiscale

CAP Città Prov.

Telefono Cellulare Email

Note

Serie Immagini

Carica Elimina Salva Inizia Tr. Importa Esci

Premere "Elimina"  per eliminare la scheda.


Per tornare all'elenco pazienti, utilizzare 





Anagrafica Paziente

Elimina Paziente

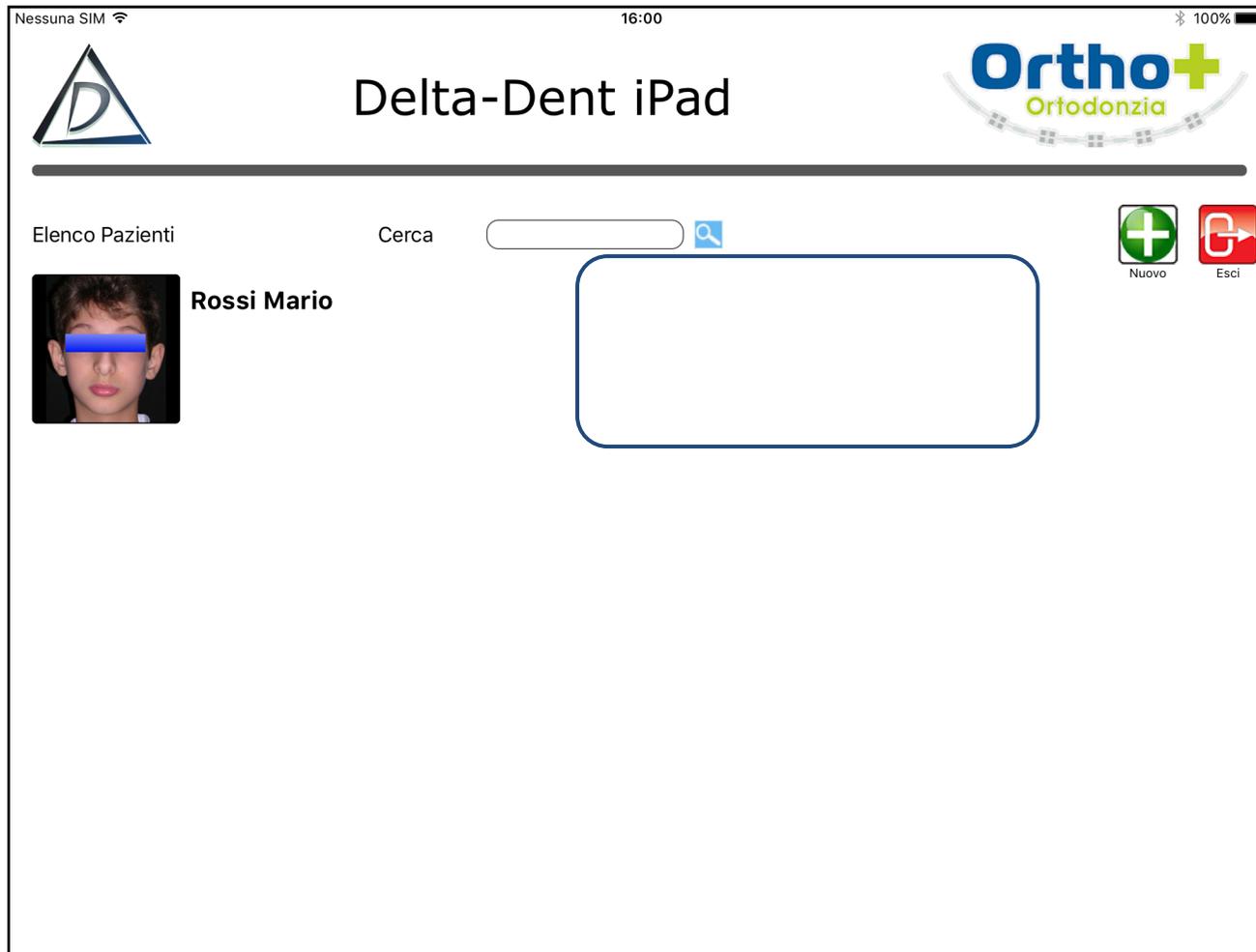

Il paziente è stato eliminato.





Importazione Immagini

Nessuna SIM 16:01 100%

Data: 11/10/2016 Seleziona Tipologia: Foto + RX Note: Pretrattamento

Salva Esci

				RX Frontale PA	



Importazione Immagini

Nuova Serie

Nessuna SIM 16:00 100%

Scheda Paziente

Carica Elimina Salva Inizia Tr. Importa Esci



Cognome Nome

Nato il A Sesso M F Inserito il

Indirizzo Cod. Fiscale

CAP Città Prov.

Telefono Cellulare Email

Note

Serie Immagini


Aprire la scheda e premere  "Importa" per iniziare ad acquisire le immagini.





Importazione Immagini

Nuova Serie

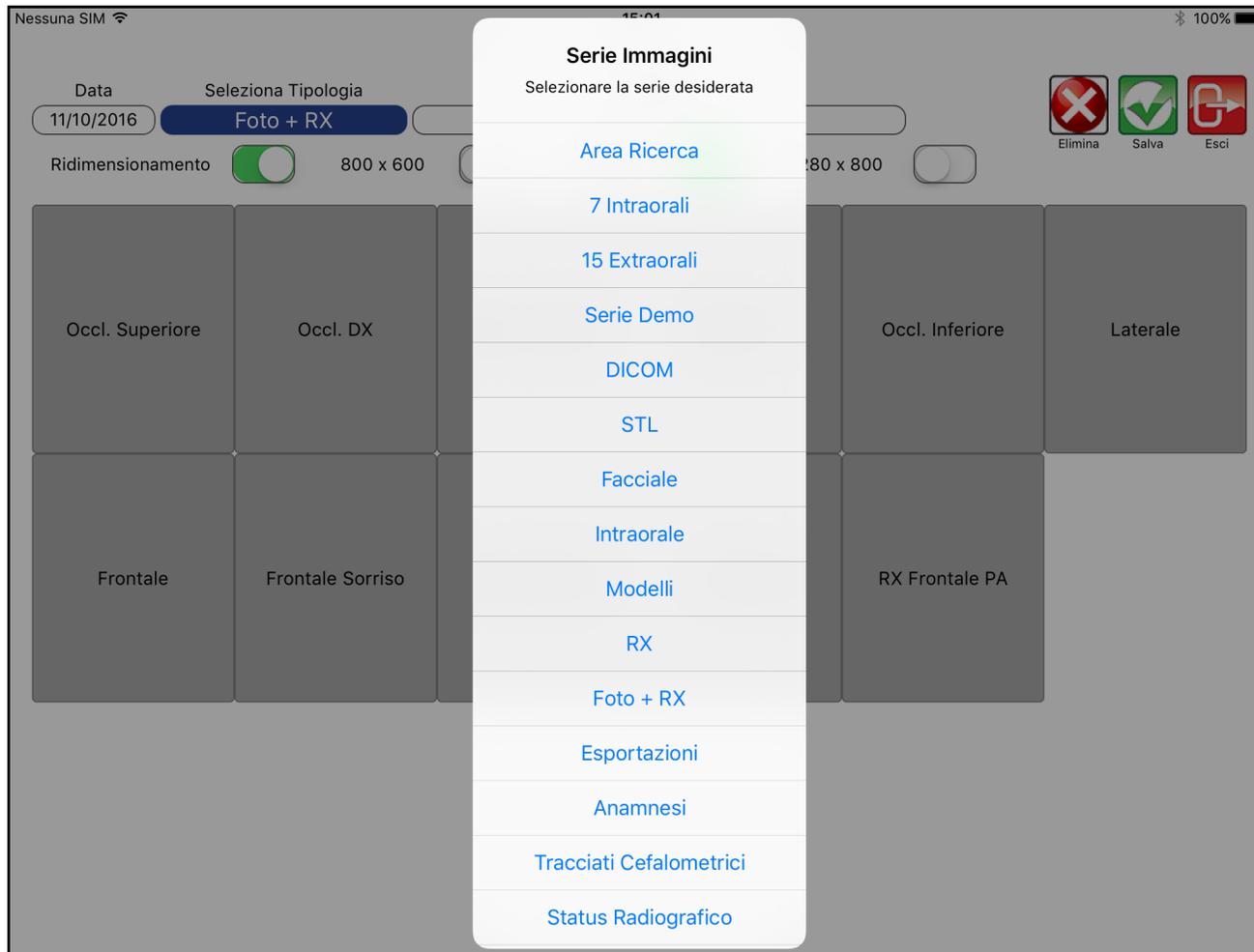

Specificare la data di acquisizione delle immagini e selezionare la tipologia.





Importazione Immagini

Nuova Serie

Nessuna SIM 15:01 100%

Data: 11/10/2016 Seleziona Tipologia: Foto + RX Note: _____

Ridimensionamento: 800 x 600 1024 x 768 1280 x 800


Elimina Salva Esci

Occl. Superiore	Occl. DX	Occl. Frontale	Occl. SX	Occl. Inferiore	Laterale
Frontale	Frontale Sorriso	RX Panoramica	RX Laterale	RX Frontale PA	



Importazione Immagini

Nuova Serie

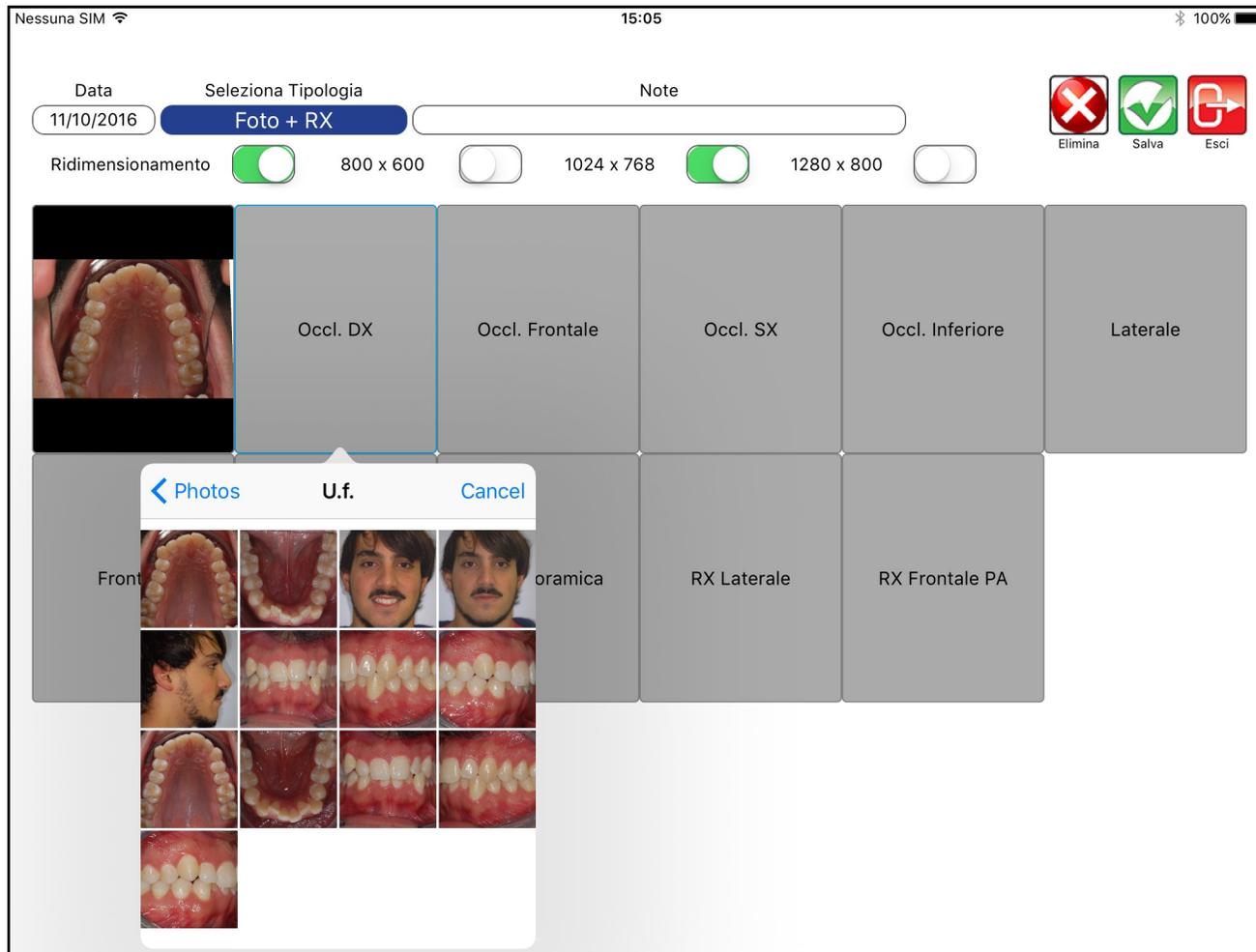


Premere su ciascun riquadro per importare la foto, selezionandola tra quelle presenti nel proprio dispositivo.





Importazione Immagini

Nuova Serie

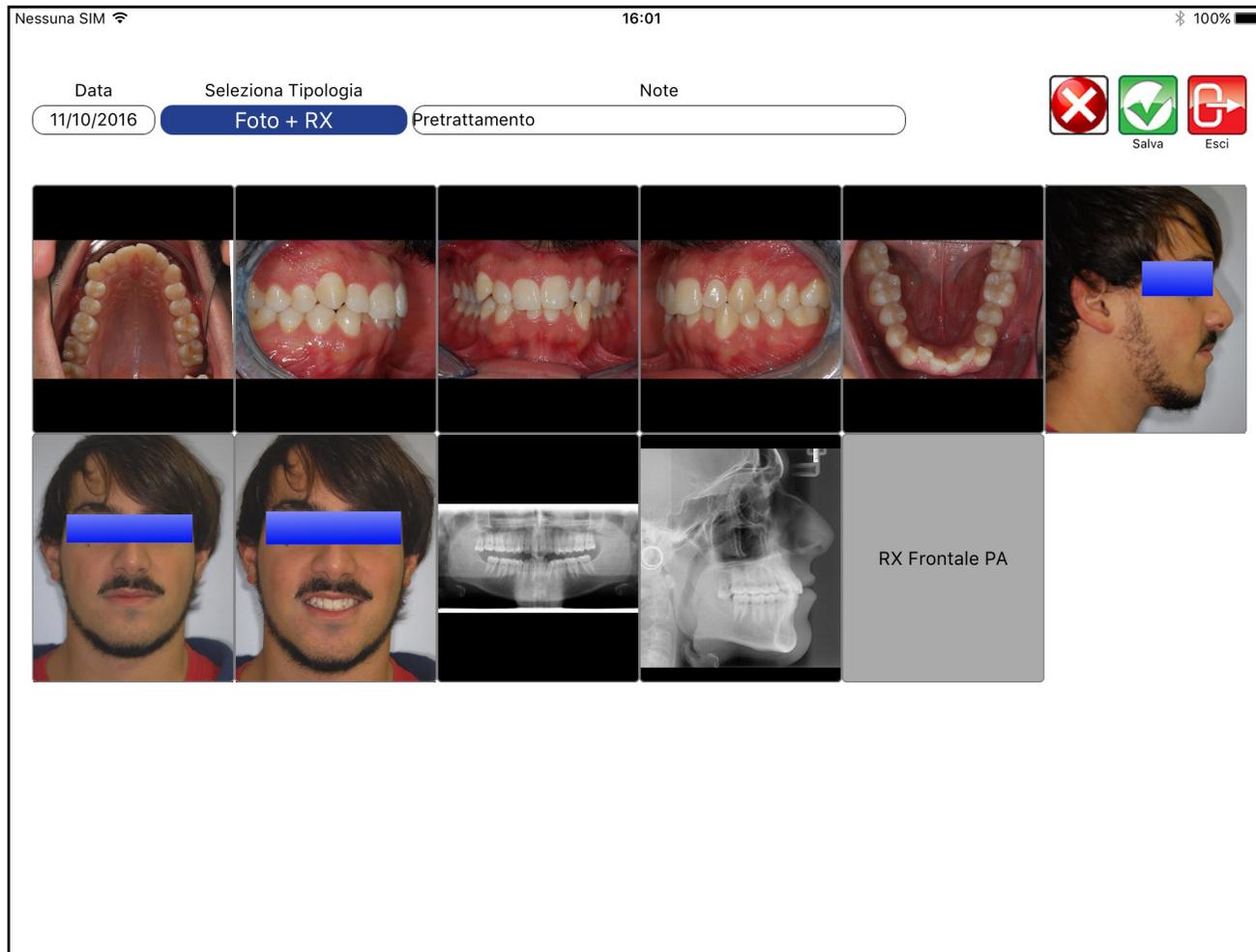

Al termine, premere “Salva”  e successivamente “Esci”  per tornare nella scheda del paziente.



Importazione Immagini

Nuova Serie

Nessuna SIM 16:00 100%

Scheda Paziente

Carica Elimina Salva Inizia Tr. Importa Esci

Cognome Nome

Nato il A Sesso M F Inserito il

Indirizzo Cod. Fiscale

CAP Città Prov.

Telefono Cellulare Email

Note

Serie Immagini

11/10/2016 Foto + RX Pretrattamento

Occl. Superiore Occl. DX Occl. Frontale Occl. SX Occl. Inferiore

Laterale Frontale Frontale Sorriso

11/10/2016 RX

RX Panoramica RX Laterale

Le importazioni sono visibili in cartella.





Importazione Immagini

Modifica Serie

Nessuna SIM 16:00 100%

Scheda Paziente

Carica Elimina Salva Inizia Tr. Importa Esci

Cognome Nome

Nato il A Sesso M F Inserito il

Indirizzo Cod. Fiscale

CAP Città Prov.

Telefono Cellulare Email

Note

Serie Immagini

11/10/2016 Foto + RX Pretrattamento

Occl. Superiore Occl. DX Occl. Frontale Occl. SX Occl. Inferiore Laterale Frontale Frontale Sorriso

Premere il tasto "Modifica" 





Importazione Immagini

Modifica Serie

Nessuna SIM 16:01 100%

Data: 11/10/2016 Seleziona Tipologia: Foto + RX Note: Pretrattamento

Salva Esci

The screenshot displays a mobile application interface for managing dental images. At the top, there is a status bar showing 'Nessuna SIM', the time '16:01', and '100%' battery. Below this, there are three input fields: 'Data' with the value '11/10/2016', 'Seleziona Tipologia' with a dropdown menu showing 'Foto + RX', and 'Note' with the value 'Pretrattamento'. To the right of these fields are three icons: a red 'X' icon, a green checkmark icon labeled 'Salva', and a red 'G' icon labeled 'Esci'. The main area of the interface is a grid of images. The top row contains six images: five clinical photos of teeth (maxillary and mandibular views) and one profile photo of a patient. The bottom row contains four images: two more profile photos of the patient, a panoramic radiograph (RX Frontale PA), and a lateral cephalometric radiograph. The text 'RX Frontale PA' is visible below the lateral cephalometric radiograph.

Selezionare la foto da modificare ed importare quella corretta.

Premere "Salva"  per confermare e poi "Esci"  per tornare all'anagrafica del paziente.



Importazione Immagini

Elimina Serie

Nessuna SIM 16:00 100%

Scheda Paziente

Carica Elimina Salva Inizia Tr. Importa Esci

Cognome Nome

Nato il A Sesso Inserito il

Indirizzo Cod. Fiscale

CAP Città Prov.

Telefono Cellulare Email

Note

Serie Immagini

11/10/2016 Foto + RX Pretrattamento

11/10/2016 RX

Premere il tasto "Elimina"  in corrispondenza della serie da eliminare.



Importazione Immagini

Elimina Serie

Nessuna SIM 16:00 100%

Scheda Paziente

Carica Elimina Salva Inizia Tr. Importa Esci

Cognome Nome

Nato il A Sesso M F Inserito il

Indirizzo Cod. Fiscale

CAP Città Prov.

Telefono Cellulare Email

Note

Serie Immagini

11/10/2016 Foto + RX Pretrattamento

Occl. Superiore Occl. DX Occl. Frontale Occl. SX Occl. Inferiore Laterale Frontale Frontale Sorriso

La serie è stata eliminata.





Tracciato

Nessuna SIM 16:00 100%

Importa Calibra Inizia Tr. Indietro Avanti Riavvia Correggi Sposta Sovr. Foto Strumenti Stampa Salva Esci

Ricketts

G01 - Rapporti Dentali	
Relazione Molare (A6-B6)	-1,4 mm
Overjet (B1-A1 Horz.)	7,0 mm
Overbite (B1-A1 Vert.)	5,0 mm
Estrusione Incisivo Inf. (B1-Occl.)	2,8 mm
Ang. Interincisivo (A1 - B1 angle)	140,1 °
G02 - Rapporti Scheletrici	
Convessità (A-NPog)	4,5 mm
Altezza Facciale Infer. (ANS-Xi-Pm)	42,4 °
G03 - Rapporti Dentoscheletrici	
Posizione Molare Superiore	15,4 mm
Protrusione Incisivo Inf. (B1-APog)	-0,2 mm
Protrusione Incisivo Sup. (A1-APog)	6,4 mm
Inclinazione Incisivo Inferiore	13,8 °
Inclinazione Incisivo Superiore	26,0 °
Piano Occl. a ramo mandibolare	0,5 mm
Inclinazione Piano Occlusale	19,2 °
G04 - Estetica	
Protrusione Labiale (LL-PnPog')	-3,2 mm
Lunghezza Labbro Superiore	23,5 mm
Commessura Labiale	-3,8 mm
G05 - Rapporti Craniofacciale	
Profondità Facciale (PoOr-NPog)	88,7 °
Asse Facciale (BaN-PTGn)	85,4 °
Cono Facciale (angolo conico)	61,4 °
Ang. Piano Mandibolare (GocMe-PoOr)	29,9 °
Profondità Mascellare (PoOr-NA)	93,4 °
Altezza Mascellare (N-CF-A)	58,2 °
Piano Palatale (PoOr-ANSPNS)	-3,5 °
G06 - Rapporti delle Strutture Profonde	
Deflessione Cranica (BaN-PoOr)	33,1 °
Lunghezza Cranica Anteriore (CC-N)	55,9 mm
Altezza Facciale Posteriore	47,0 mm
Posizione del Ramo	72,3 °
Localizzazione del Porion	-39,4 mm
Arco Mandibolare (DC-Xi-Pm)	28,2 °
Lunghezza Corpo Mandibolare (Xi-Pm)	63,3 mm





Tracciato

Realizzazione

Nessuna SIM 16:00 100%

Scheda Paziente

Carica Elimina Salva Inizia Tr. Importa Esci

Cognome Nome

Nato il A Sesso Inserito il

Indirizzo Cod. Fiscale

CAP Città Prov.

Telefono Cellulare Email

Note

Serie Immagini

11/10/2016 Foto + RX Pretrattamento

Occl. Superiore Occl. DX Occl. Frontale Occl. SX Occl. Inferiore

Laterale Frontale Frontale Sorriso

11/10/2016 RX

RX Panoramica RX Laterale


Selezionare RX Laterale per avviare la realizzazione del tracciato.





Tracciato

Realizzazione

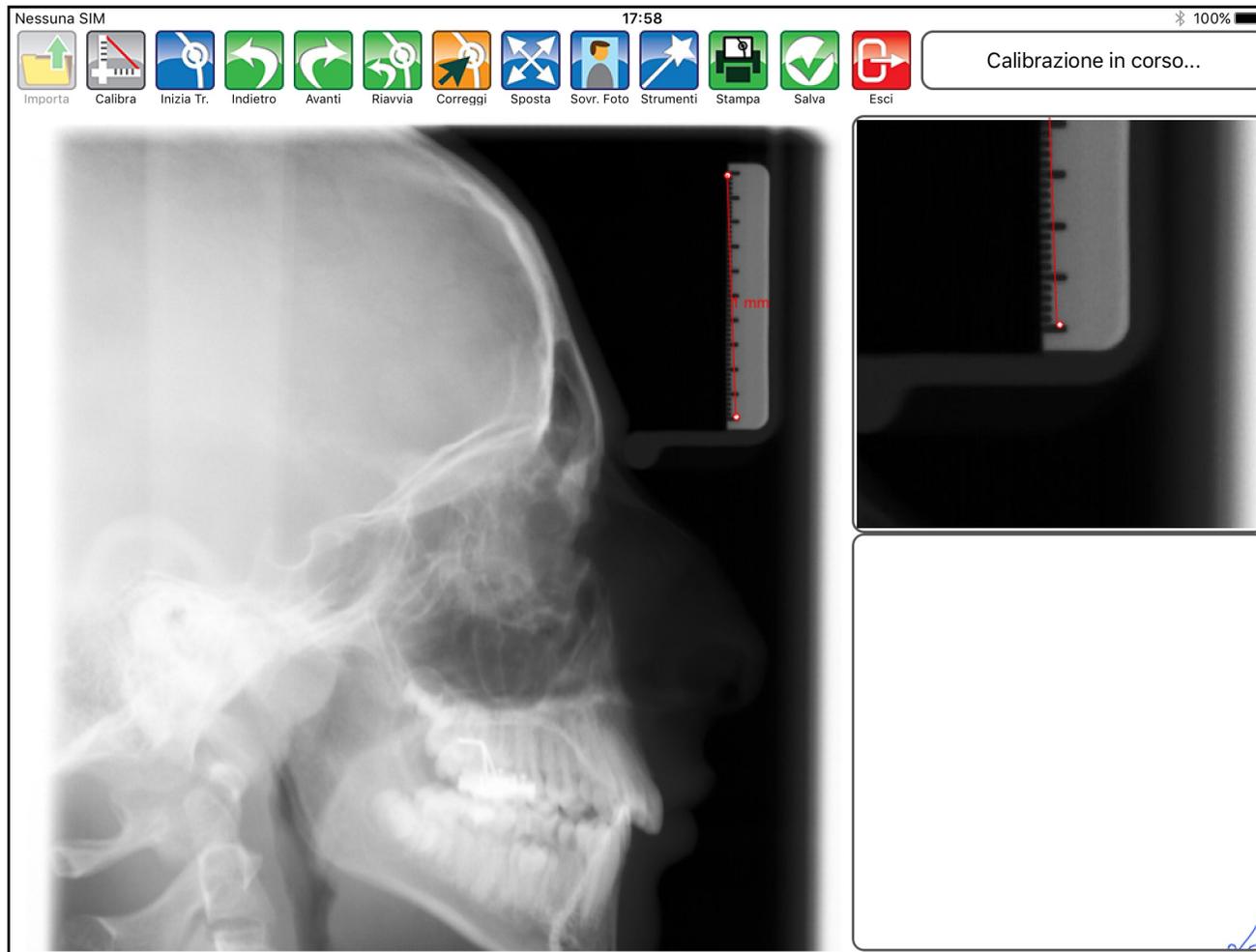

Per prima cosa, occorre calibrare il documento.


Premere 

Fissare quindi i due punti in corrispondenza dell'inizio e della fine del righellino.



Tracciato

Realizzazione

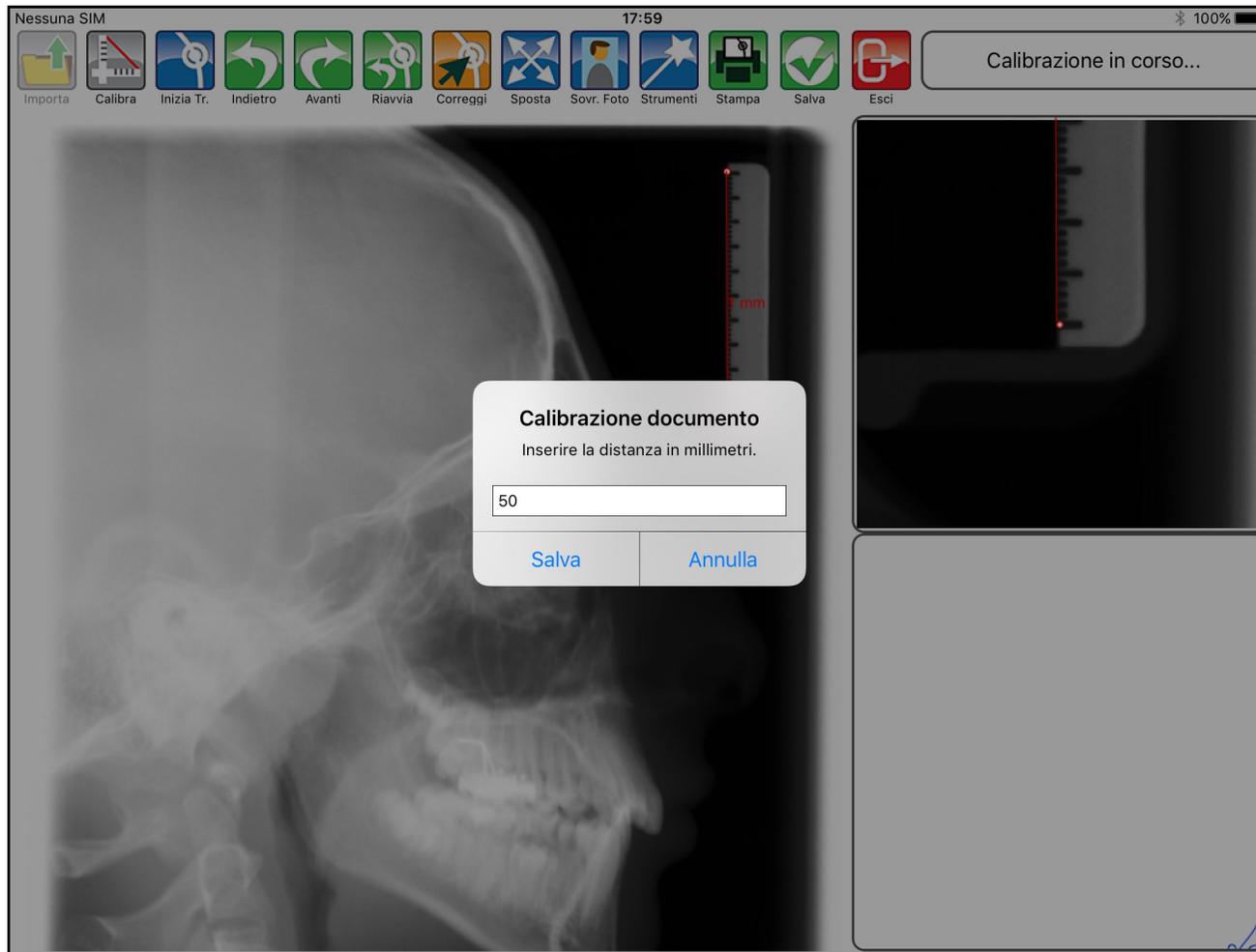

Inserire il valore della misurazione e confermare.





Tracciato

Realizzazione




Il valore è indicato accanto alla linea rossa.



Tracciato

Realizzazione

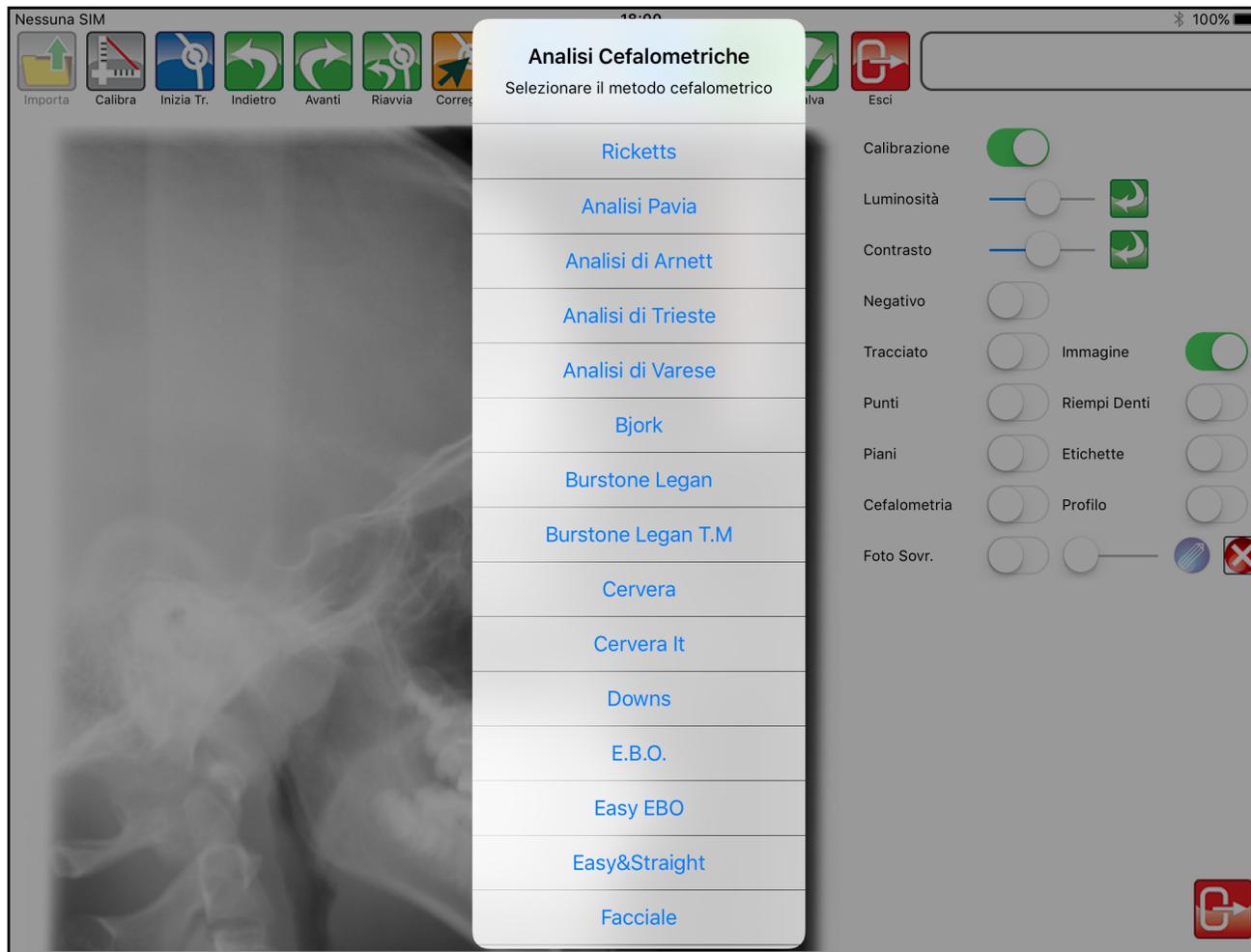

Per iniziare a collocare i punti, premere “Inizia Tr.” 


Selezionare la metodica per procedere.





Tracciato

Realizzazione

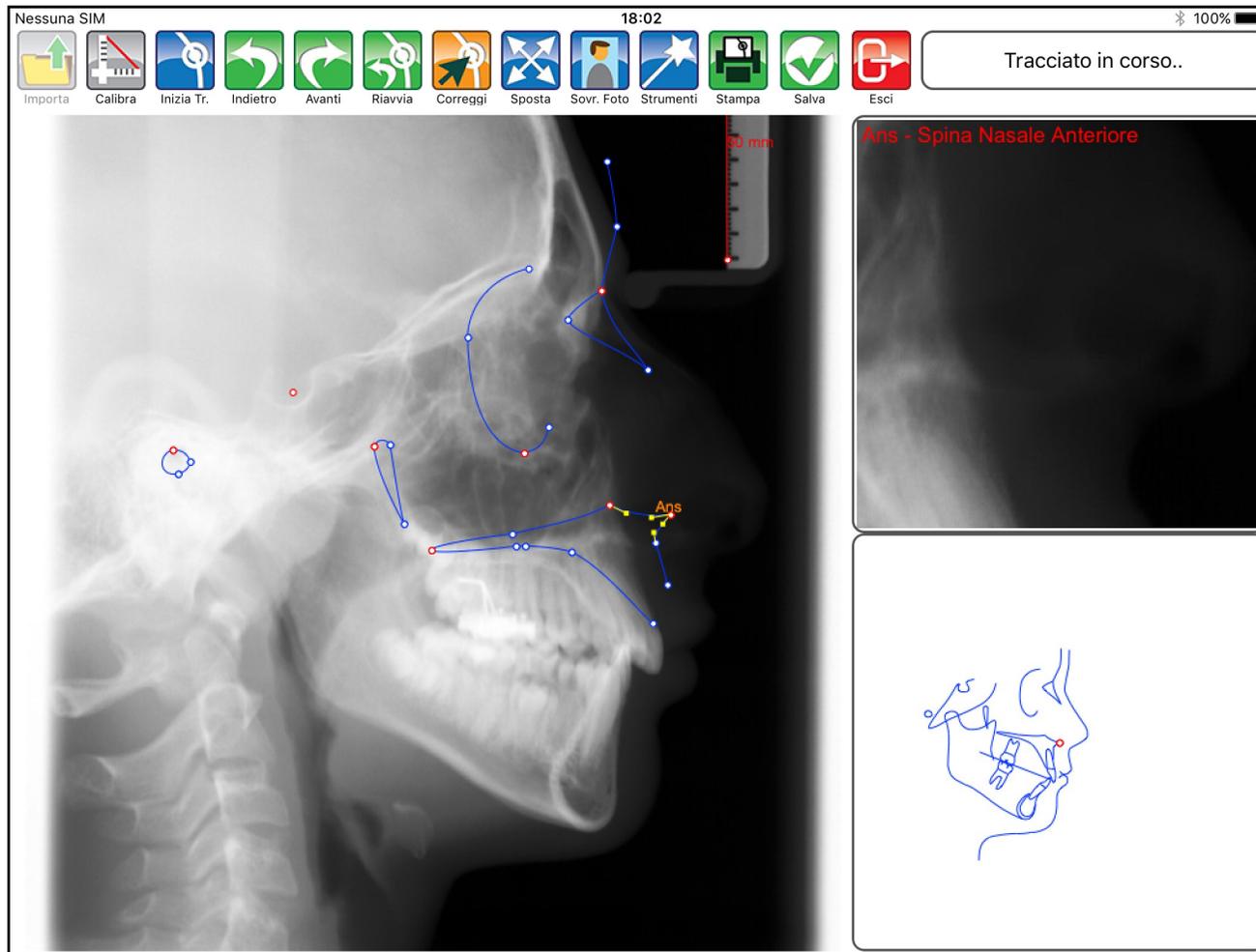


Fissare i punti nell'ordine richiesto dall'App, utilizzando la guida posizionata in basso a destra e l'area di zoom in alto a sinistra.





Tracciato

Correzione

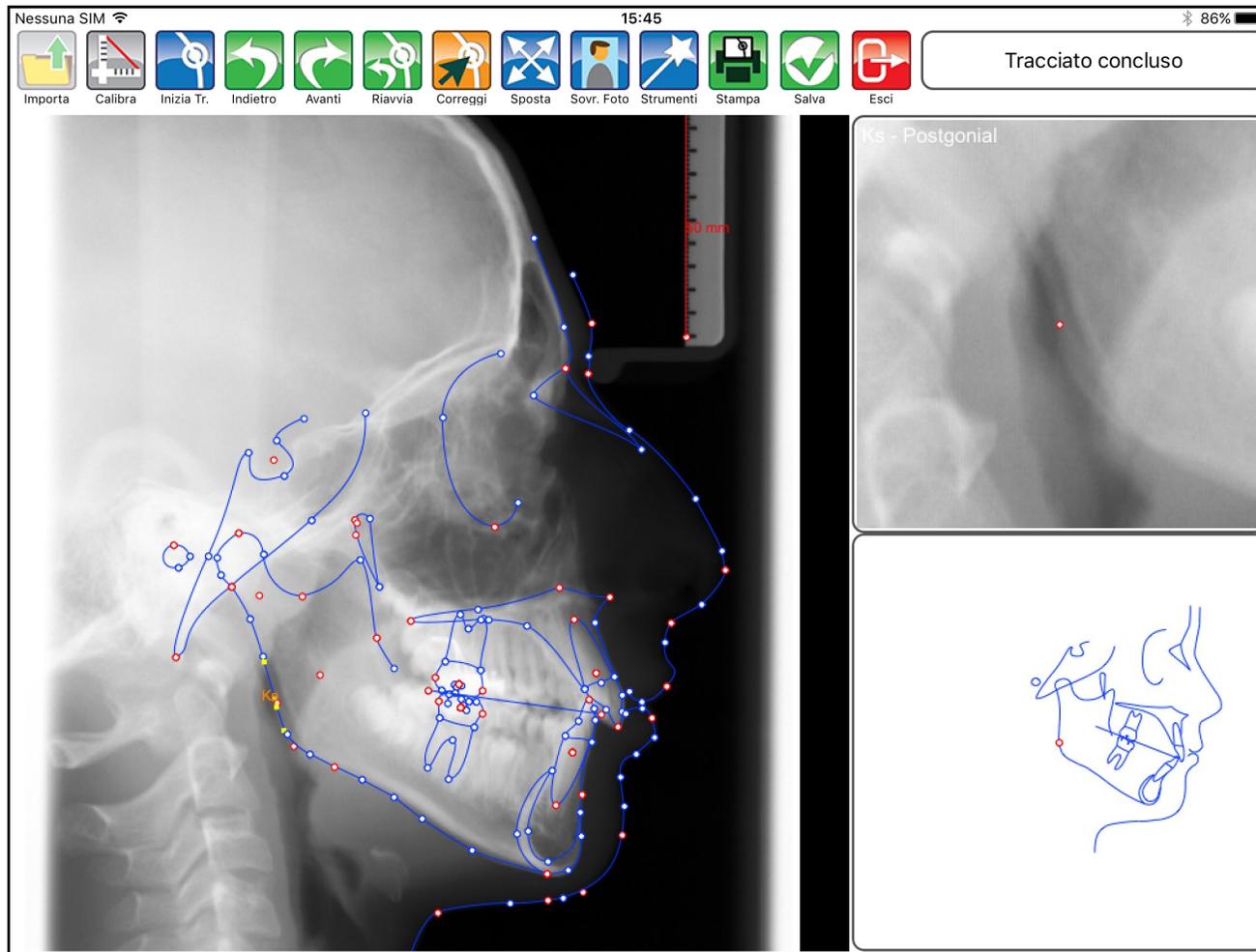

Al termine, premere “Correggi”  per rifinire il tracciato.


Si attiva nuovamente la guida e lo zoom, utili per posizionare i punti secondari e per correggere le linee.





Tracciato

Tools

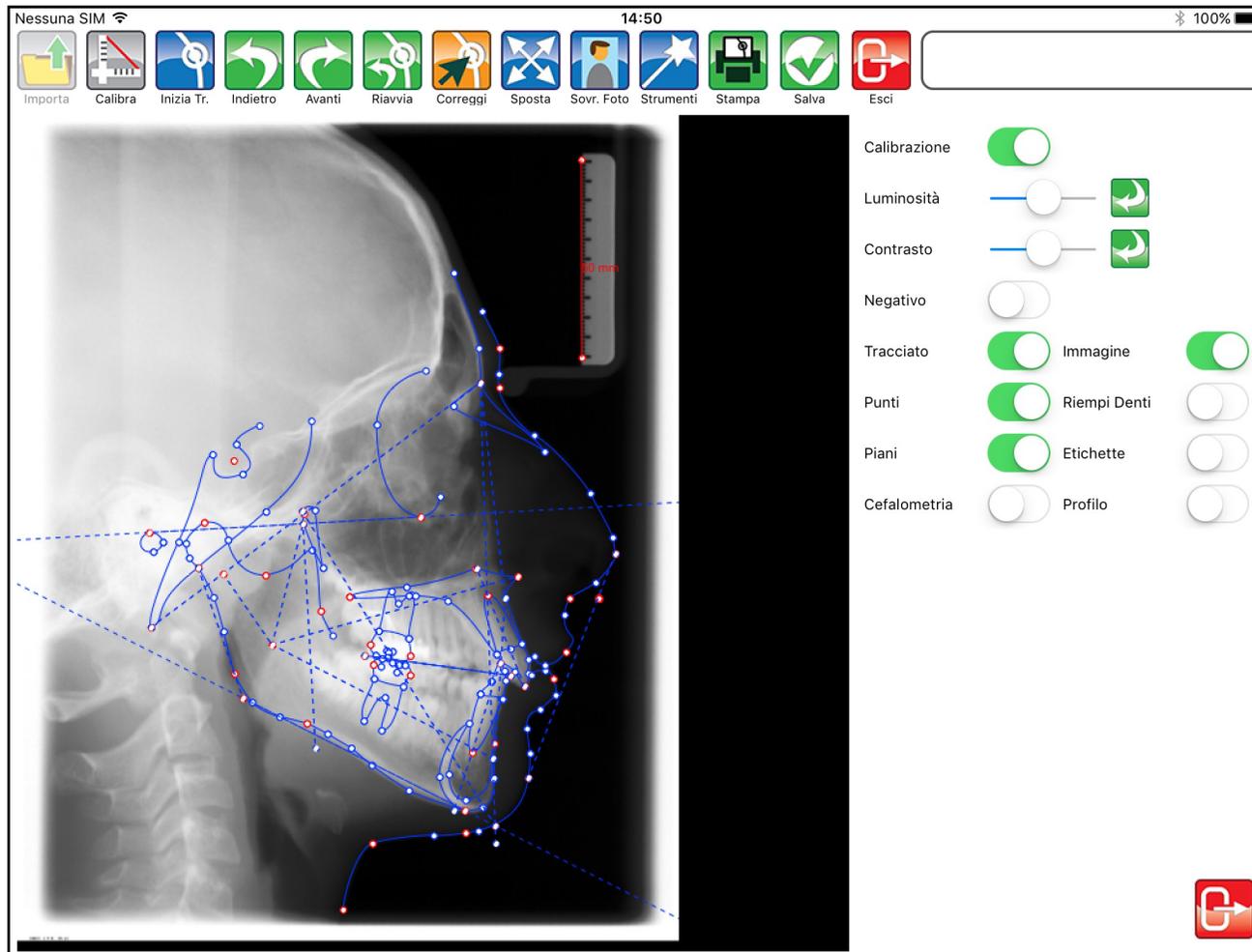

Premere “Strumenti” 

In questo pannello si trovano gli strumenti necessari a regolare l’immagine: Luminosità, Contrasto.

Si trovano inoltre i tasti per attivare i piani e disattivare i punti, per avere un tracciato ordinato.

Premere “Esci”, situato in baso a destra, per tornare alla schermata precedente.



Tracciato

Tools

Ricketts

G01 - Rapporti Dentali	
Relazione Molare (A6-B6)	-1,4 mm
Overjet (B1-A1 Horz.)	7,0 mm
Overbite (B1-A1 Vert.)	5,0 mm
Estrusione Incisivo Inf. (B1-Occl.)	2,8 mm
Ang. Interincisivo (A1 - B1 angle)	140,1 °
G02 - Rapporti Scheletrici	
Convessità (A-NPog)	4,5 mm
Altezza Facciale Infer. (ANS-Xi-Pm)	42,4 °
G03 - Rapporti Dentoscheletrici	
Posizione Molare Superiore	15,4 mm
Protrusione Incisivo Inf. (B1-APog)	-0,2 mm
Protrusione Incisivo Sup. (A1-APog)	6,4 mm
Inclinazione Incisivo Inferiore	13,8 °
Inclinazione Incisivo Superiore	26,0 °
Piano Occl. a ramo mandibolare	0,5 mm
Inclinazione Piano Occlusale	19,2 °
G04 - Estetica	
Protrusione Labiale (LL-PnPog')	-3,2 mm
Lunghezza Labbro Superiore	23,5 mm
Commessura Labiale	-3,8 mm
G05 - Rapporti Craniofacciale	
Profondità Facciale (PoOr-NPog)	88,7 °
Asse Facciale (BaN-PTGn)	85,4 °
Cono Facciale (angolo conico)	61,4 °
Ang. Piano Mandibolare (GocMe-PoOr)	29,9 °
Profondità Mascellare (PoOr-NA)	93,4 °
Altezza Mascellare (N-CF-A)	58,2 °
Piano Palatale (PoOr-ANSPNS)	-3,5 °
G06 - Rapporti delle Strutture Profonde	
Deflessione Cranica (BaN-PoOr)	33,1 °
Lunghezza Cranica Anteriore (CC-N)	55,9 mm
Altezza Facciale Posteriore	47,0 mm
Posizione del Ramo	72,3 °
Localizzazione del Porion	-39,4 mm
Arco Mandibolare (DC-Xi-Pm)	28,2 °
Lunghezza Corpo Mandibolare (Xi-Pm)	63,3 mm


Il risultato finale è un tracciato completo.





Tracciato

Sovrapposizione Foto

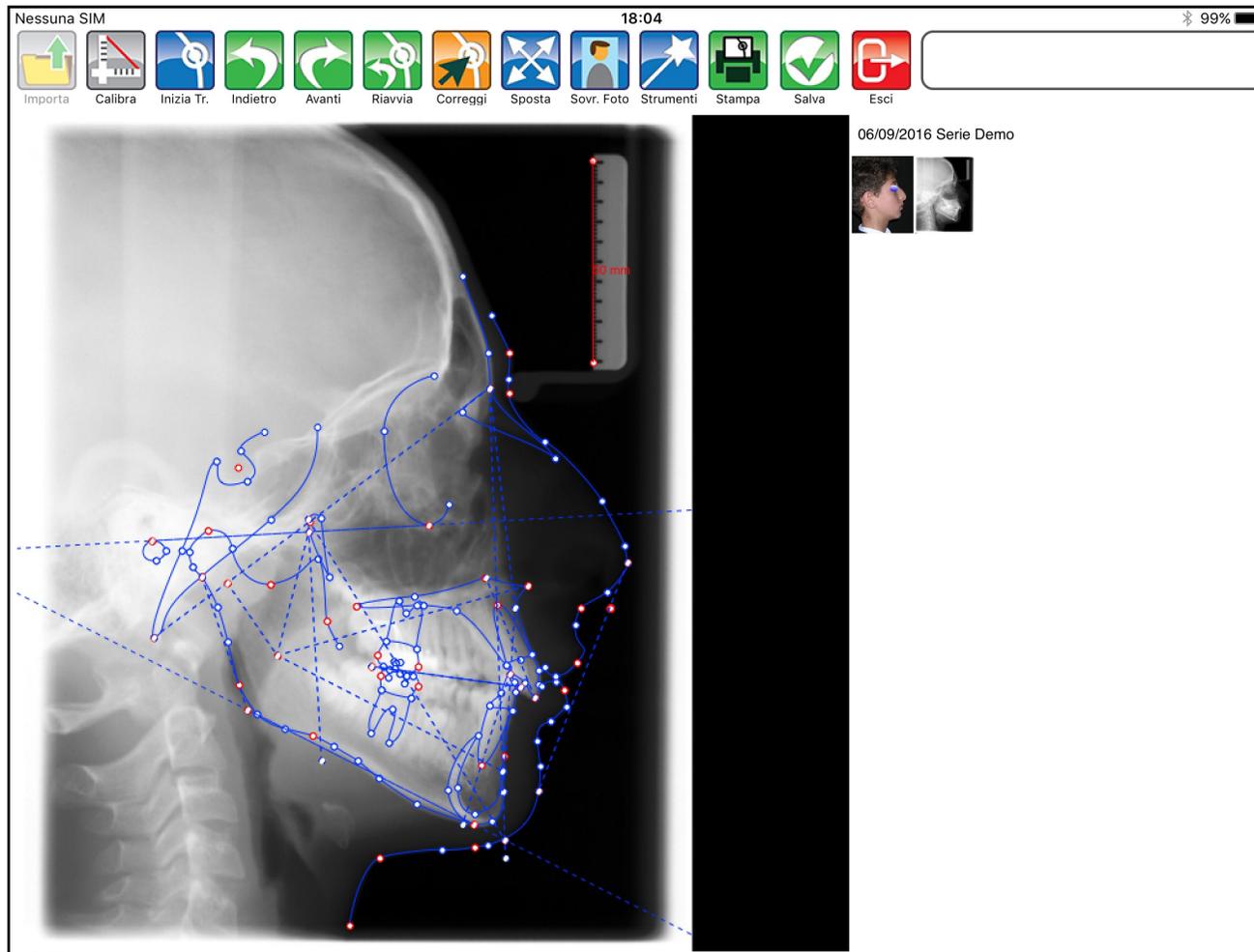

Premere "Sovr. Foto"



Tra quelle proposte, selezionare la foto del profilo laterale del paziente.





Tracciato

Sovrapposizione Foto

Nessuna SIM 18:04 99%

Importa Calibra Inizia Tr. Indietro Avanti Riavvia Correggi Sposta Sovr. Foto Strumenti Stampa Salva Esci

Ricketts

G01 - Rapporti Dentali	
Relazione Molare (A6-B6)	-1,4 mm
Overjet (B1-A1 Horz.)	6,9 mm
Overbite (B1-A1 Vert.)	4,9 mm
Estrusione Incisivo Inf. (B1-Occl.)	2,8 mm
Ang. Interincisivo (A1 - B1 angle)	140,1 °
G02 - Rapporti Scheletrici	
Convessità (A-NPog)	4,5 mm
Altezza Facciale Infer. (ANS-Xi-Pm)	42,4 °
G03 - Rapporti Dentoscheletrici	
Posizione Molare Superiore	15,4 mm
Protrusione Incisivo Inf. (B1-APog)	-0,2 mm
Protrusione Incisivo Sup. (A1-APog)	6,4 mm
Inclinazione Incisivo Inferiore	13,8 °
Inclinazione Incisivo Superiore	26,0 °
Piano Occl. a ramo mandibolare	0,5 mm
Inclinazione Piano Occlusale	19,2 °
G04 - Estetica	
Protrusione Labiale (LL-PnPog')	-3,2 mm
Lunghezza Labbro Superiore	23,4 mm
Commessura Labiale	-3,8 mm
G05 - Rapporti Craniofacciale	
Profondità Facciale (PoOr-NPog)	88,7 °
Asse Facciale (BaN-PTGn)	85,4 °
Cono Facciale (angolo conico)	61,4 °
Ang. Piano Mandibolare (GocMe-PoOr)	29,9 °
Profondità Mascellare (PoOr-NA)	93,4 °
Altezza Mascellare (N-CF-A)	58,2 °
Piano Palatale (PoOr-ANSPNS)	-3,5 °
G06 - Rapporti delle Strutture Profonde	
Deflessione Cranica (BaN-PoOr)	33,1 °
Lunghezza Cranica Anteriore (CC-N)	55,8 mm
Altezza Facciale Posteriore	46,9 mm
Posizione del Ramo	72,3 °
Localizzazione del Porion	-39,3 mm
Arco Mandibolare (DC-Xi-Pm)	28,2 °
Lunghezza Corpo Mandibolare (Xi-Pm)	63,2 mm

Trascinare i punti N ed Me sulla foto del paziente.





Tracciato

Sovrapposizione Foto

Nessuna SIM 18:04 99%

Importa Calibra Inizia Tr. Indietro Avanti Riavvia Correggi Sposta Sovr. Foto Strumenti Stampa Salva Esci

Tracciato concluso

Ricketts

G01 - Rapporti Dentali	
Relazione Molare (A6-B6)	-1,4 mm
Overjet (B1-A1 Horz.)	6,9 mm
Overbite (B1-A1 Vert.)	4,9 mm
Estrusione Incisivo Inf. (B1-Occl.)	2,8 mm
Ang. Interincisivo (A1 - B1 angle)	140,1 °
G02 - Rapporti Scheletrici	
Convessità (A-NPog)	4,5 mm
Altezza Facciale Infer. (ANS-Xi-Pm)	42,4 °
G03 - Rapporti Dentoscheletrici	
Posizione Molare Superiore	15,4 mm
Protrusione Incisivo Inf. (B1-APog)	-0,2 mm
Protrusione Incisivo Sup. (A1-APog)	6,4 mm
Inclinazione Incisivo Inferiore	13,8 °
Inclinazione Incisivo Superiore	26,0 °
Piano Occl. a ramo mandibolare	0,5 mm
Inclinazione Piano Occlusale	19,2 °
G04 - Estetica	
Protrusione Labiale (LL-PnPog')	-3,2 mm
Lunghezza Labbro Superiore	23,4 mm
Commessura Labiale	-3,8 mm
G05 - Rapporti Craniofacciale	
Profondità Facciale (PoOr-NPog)	88,7 °
Asse Facciale (BaN-PTGn)	85,4 °
Cono Facciale (angolo conico)	61,4 °
Ang. Piano Mandibolare (GocMe-PoOr)	29,9 °
Profondità Mascellare (PoOr-NA)	93,4 °
Altezza Mascellare (N-CF-A)	58,2 °
Piano Palatale (PoOr-ANSPNS)	-3,5 °
G06 - Rapporti delle Strutture Profonde	
Deflessione Cranica (BaN-PoOr)	33,1 °
Lunghezza Cranica Anteriore (CC-N)	55,8 mm
Altezza Facciale Posteriore	46,9 mm
Posizione del Ramo	72,3 °
Localizzazione del Porion	-39,3 mm
Arco Mandibolare (DC-Xi-Pm)	28,2 °
Lunghezza Corpo Mandibolare (Xi-Pm)	63,2 mm

La sovrapposizione è completata.





Tracciato

Sovrapposizione Foto

Nessuna SIM 18:04 99%

Importa Calibra Inizia Tr. Indietro Avanti Riavvia Correggi Sposta Sovr. Foto Strumenti Stampa Salva Esci

Tracciato concluso

Calibrazione

Luminosità

Contrasto

Negativo

Tracciato Immagine

Punti Riempi Denti

Piani Etichette

Cefalometria Profilo

Foto Sovr.

Utilizzare il pannello degli strumenti per avere la foto del paziente in trasparenza.



Tracciato

Sovrapposizione Foto

Nessuna SIM 18:03 99%

Importa Calibra Inizia Tr. Indietro Avanti Riavvia Correggi Sposta Sovr. Foto Strumenti Stampa Salva Esci

Calibrazione

Luminosità

Contrasto

Negativo

Tracciato Immagine

Punti Riempi Denti

Piani Etichette

Cefalometria Profilo

Foto Sovr.